

取扱説明書 保証書付 MCE-3526	Electrical Muscle Stimulation PROSTONG プロストング	
---------------------------	---	--

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は大切に保管して下さい。

安全上のご注意

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		誤った取扱をすると、人が傷害（※1）を負ったり、物的損害（※2）の発生が想定される内容を示します。
--	---	--	---

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、けがや感電等をさします。
 ※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止（してはいけないこと）を示します。		強制（必ずすること）を示します。
--	---------------------	--	------------------

警告

分解禁止
 ・絶対に分解・修理・改造は行わない。※感電や思わぬけが、製品の故障に繋がる恐れがあります。

禁止
 ・子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。
 ※思わぬけがの原因となります。
 ・1日の使用目安は各部位2回（1セット30分）までとし、連続して使用しない。
 ・一度に強さを上げ過ぎない。※加減しながら調節して下さい。
 ・睡眠時や運転時は使用しない。
 ・下記の様な方は絶対に本製品を使用しない。
 ■ペースメーカー等の体内埋込型医療用電気機器を使用されている方
 ■人工心肺等の生命維持用医療用電子機器を使用されている方
 ■心電計等の装着形の医療用電子機器を使用されている方
 ■病中、病後、療養中の方

・次の様な場合は使用しない。
 ■心臓疾患及び、不整脈の方
 ■血圧が正常値ではない方
 ■悪性腫瘍のある方
 ■がんの方
 ■皮膚病患者、アレルギーをお持ちの方
 ■熱がある場合、また体調が優れない場合
 ■肌が弱い方
 ■結核病患者の方
 ■生理期間中、妊婦、療養中の方
 ■体内にポルト等の金属を入れている方

・下記の箇所には使用しない。
 ■心臓の近く、頭部、顔、陰部
 ■肌荒れ、すり傷、ただれ、やけど、にきび、吹き出物のある箇所

強制
 ・使用中、体に異変を感じた場合はすぐに使用を中止する。

注意

禁止
 ・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。
 ・破損したら使用しない。
 ・子供の手の届く場所に保管しない。
 ・電池を入れる際、本体裏面の金属部分に触れない。
 ※On/Hi ボタンに触れて電源が入った場合、電気が流れる恐れがあります。

	・使用しない時は、電池を抜いて保管する。 ・必ずジェル又はクリームを塗ってから使用する。		・浴室などの水場で使用しない。 ・※感電・製品の故障の原因となります。
	・濡れた手で電池の交換はしない。 ・※感電・製品の故障の原因となります。		・本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ・※感電・製品の故障の原因となります。





使用上のご注意

内容を守らないと製品の動作に問題が生じたり製品本体の故障や劣化に繋がる注意事項、又その他の注意を示します。

- 付属の電池はテスト用電池です。ご使用中の動作や反応が弱くなった場合は市販の電池をお買い求めの上ご使用下さい。
- 付属の電池はテスト用電池ですので、電池不良による不良品の受付は致しかねます。
- ご使用後はベルトやパッドに付いたジェルを拭き取ってから保管して下さい。
- 付属のジェルが肌に合わない・無くなった場合は市販のジェル又はクリームをお買い求めの上ご使用下さい。
- 高温になる場所、湿気が多い場所、直射日光の当たる場所への保管・放置はおやめ下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際のシンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。
- 本製品は一般家庭用です。業務用でのご使用はおやめ下さい。

仕 様			
※商品の仕様及び外観等は、予告なく変更することがあります。			
寸 法	本体:約W7×D2×H8cm パッド:約W18×H10cm ベルト:約W125×H17.5cm		
材 質	ABS 鉄 ゴム ナイロン ポリエステル	重 量	約270g
対応サイズ	ウエスト約120cmまで	ジェル量	約30ml
電源方式	リチウム電池式:コイン形リチウム電池CR2032形1個使用(テスト用1個付属)		
ジェル成分	水 グリセリン PG カルボマー DEA メチルクロロイソチアゾリノン		

各部名称

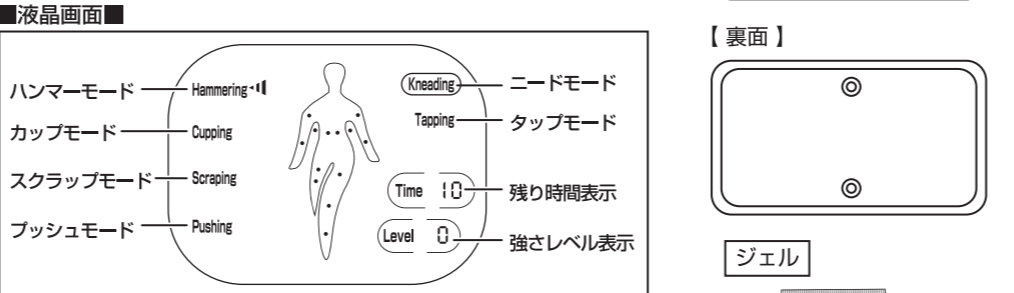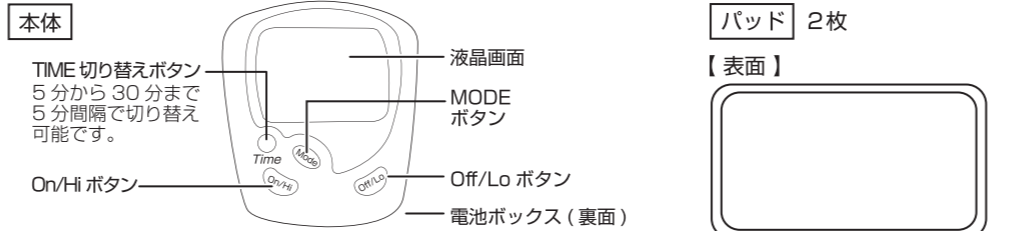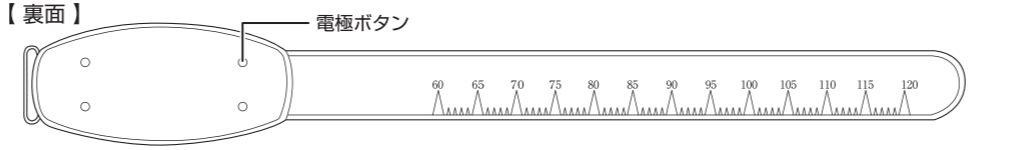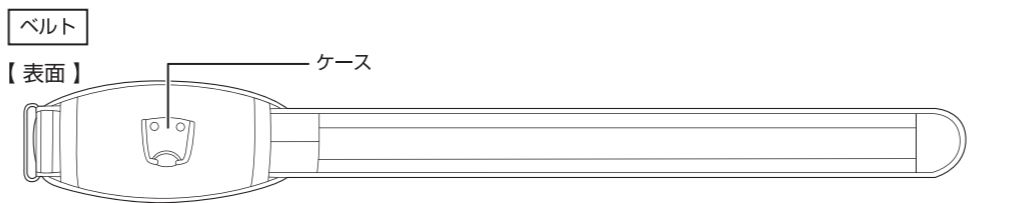


モード種類	リズムパターン
ハンマーモード	とても短い動作と間隔の連続的なリズム
カップモード	長い動作と間隔の連続的なリズム
スクラップモード	非常に長い動作と間隔の連続的なリズム
プッシュモード	短い動作と間隔の連続的なリズム
ニードモード	複数のプログラムを組み合わせた動き
タップモード	複数のプログラムを組み合わせた動作が長い動き

電池のセット

※付属の電池はテスト用電池です。ご使用中の動作や反応が弱くなった場合は市販の電池をお買い求めの上ご使用下さい。
 ※付属の電池はテスト用電池ですので、電池不良による不良品の受付は致しかねます。
 ※電池を入れる際、本体裏面の金属部分に触れないようご注意ください。On/Hi ボタンに触れて電源が入った場合、電気が流れる恐れがあります。

- ①ベルトのケースから本体を取り外します。(図1参照)
 ※手前に引きながら上にスライドして外します。
- ②本体の電池ボックスのカバーをスライドして開け、新しいCR2032形リチウム電池1個をプラス面を上向きにしてセットします。(図2参照)
 ※ツメが電池の側面に触れるように電池を入れて下さい。
- ③電池ボックスのカバーをもとに戻します。

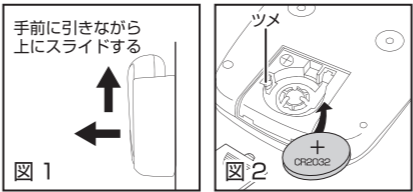

使用方法

- ・下記の様な方は絶対に本製品を使用しない。
 ■ペースメーカー等の体内埋込型医療用電気機器を使用されている方
 ■人工心肺等の生命維持用医療用電子機器を使用されている方
 ■心電計等の装着形の医療用電子機器を使用されている方
 ■病中、病後、療養中の方
- ・次の様な場合は使用しない。
 ■心臓疾患及び、不整脈の方
 ■血圧が正常値ではない方
 ■悪性腫瘍のある方
 ■ガンの方
 ■皮膚病患者、アレルギーをお持ちの方
 ■熱がある場合、また体調が優れない場合
 ■肌が弱い方
 ■結核病患者の方
 ■生理期間中、妊婦、療養中の方
 ■体内にポルト等の金属を入れている方
- ・下記の箇所には使用しない。
 ■心臓の近く、頭部、顔、陰部
 ■肌荒れ、すり傷、ただれ、やけど、にきび、吹き出物のある箇所
- ・1日の使用目安は各部位2回（1セット30分）までとし、連続して使用しないで下さい。
- ・一度に強さを上げ過ぎないで下さい。※加減しながら調節して下さい。
- ・睡眠時や運転時は使用しないで下さい。

①ベルトの裏面の電極ボタンにパッドを取り付けます。
 ※パッドを2枚きちんと取り付けていないと、本体は動作しません。必ず2枚貼付けてご使用下さい。

②ベルトの表面のケースに本体を取り付けます。

③使用する部位にジェルを塗ります。※必ずジェル又はクリームを塗ってからご使用下さい。

④使用する部位にベルトを装着します。(ベルトの装着方法参照)

⑤On/Hi ボタンを押すと電源が入り、液晶画面が表示されます。
 ※動作を開始(下記手順「⑧」)するまでは、無操作の状態が続くと、自動的に液晶画面が消灯します。

⑥MODE ボタンでモードを選びます。(各モードの説明は各部名称プログラムとリズムパターン参照)
 ※選択しているモードは「」と「」で表示されます。
 ※各モードはハンマーモード→カップモード→スクラップモード→プッシュモード→ニードモード→タップモードの順で切り替わります。
 ※ニードモード、タップモードは複数のモードを組み合わせた動きのため「」が表示され「」が動きます。

⑦TIME 切り替ボタンを押して時間を選びます。⇒液晶画面に残り時間が表示されます。
 ※5分から30分まで5分間隔で切り替え可能です。

⑧On/Hi ボタンを一度押すとLevel1の強さで動作がスタートします。

⑨On/Hi ボタンとOff/Lo ボタンで強さ(1~10)を調節します。⇒液晶画面に強さレベルが表示されます。
 On/Hi ボタン→強さアップ Off/Lo ボタン→強さダウン

- 動作が開始すると液晶画面の残り時間表示に時間のカウントが開始され、0になると自動的に動作が停止し、電源がOFF(画面消灯)になります。
- モード、強さ、時間は動作中も調整/切替を行うことができます。
- モードを動作中に切り替えると、強さが1に戻りますので再設定して下さい。
- 途中で停止する場合は、Off/Lo ボタンを押して強さを1まで下げ、もう一度Off/Lo ボタンを押すと動作が停止します。又、動作停止後に無操作の状態が続くと画面は消灯します。

ベルトの装着方法

※肌にパッドを2枚貼付けていないと、本体は稼働しません。必ず肌にしっかりパッド2枚があたるように巻いて下さい。
 ※肌に2枚のパッドが触れない部位には装着しないで下さい。
 例：二の腕などの細い部位

- ①ベルトの端をリングに通します。
- ②使用する部位に合わせて、矢印の方向にベルトの端を折り返します。
- ③ベルトの端をマジックテープで留めます。

お手入れ方法

※ご使用後は必ずお手入れしてから保管して下さい。
 ※本体・ベルト・パッドを水につけたり、水をかけたりしないで下さい。
 ※シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。
 ※電池を抜いてからお手入れをして下さい。

- 使用後は、肌についたジェルを拭き取って下さい。
- 本体、ベルト、パッドは水を含ませて硬くしぼった布で拭いて下さい。